

CONSENTIMENTO E CONCORDÂNCIA DO PACIENTE AO TRATAMENTO ORTODÔNTICO

Apesar do tratamento com alinhadores ser um tratamento ortodôntico mais confortável e que pode lhe proporcionar um belo sorriso, alertamos que qualquer tratamento ortodôntico possui suas limitações e riscos que devem ser considerados antes de se submeter ao tratamento.

PROCESSO

Para realizar o tratamento com alinhadores Click Aligner, seu doutor solicitará uma série de exames de rotina, entre eles fotografias, escaneamento intraoral e radiografias. Seu doutor enviará toda esta documentação e o planejamento detalhado do caso para a ClickLab. Nossos ortodontistas seguirão o planejamento prescrito pelo seu doutor e farão um planejamento virtual, que poderá ser enviado através de um vídeo ou link com visualizador 3D.

Feita a aprovação do planejamento virtual, inicia-se a fabricação dos alinhadores Click que são numerados individualmente e feitos especialmente para cada paciente. O número de alinhadores pode variar para cada tratamento, dependendo da complexidade do caso e do tipo de tratamento solicitado pelo seu doutor.

Seu doutor passará instruções específicas de uso e troca dos alinhadores, eles devem ser usados de 20 a 22 horas por dia e devem ser removidos apenas em casos de necessidade como alimentação, escovação e fio dental. A troca dos alinhadores é feita normalmente a cada 10 dias, porém esse tempo pode variar dependendo do uso e do plano de tratamento do seu doutor.

Poderá ser necessária a colagem de attachments (botões de resina que ajudam na movimentação e precisão do tratamento) e/ou elásticos, para facilitar determinados movimentos. Para alguns pacientes, pode ser necessário um reescaneamento das arcadas ao fim da série inicial do tratamento, para que sejam feitos novos alinhadores de refinamento.

BENEFÍCIOS

O uso de alinhadores Click, possui diversos benefícios, entre eles:

- Nossos alinhadores são praticamente imperceptíveis, então muito dificilmente o uso do mesmo será notado no dia-a-dia durante o tratamento.

- O planejamento pode ser todo visualizado virtualmente, através de um visualizador 3D.
- São uma alternativa menos invasiva que os aparelhos convencionais.
- Permitem uma melhor higienização da boca, uma vez que podem ser removidos.
- Permite um tratamento com maior conforto em relação aos aparelhos convencionais.
- Os alinhadores não possuem acessórios e fios metálicos associados aos aparelhos convencionais

RISCOS E INCONVENIÊNCIAS

Assim como em outros tratamentos ortodônticos, o uso de alinhadores ortodônticos pode envolver alguns dos riscos listados abaixo:

- (I) A falta de uso dos aparelhos pela quantidade de hora/dia, a falta de uso dos produtos de acordo com as orientações do seu doutor, ausência nas consultas, e erupção ou formatos atípicos de dentes podem prolongar o tempo de tratamento e afetar o potencial de se atingir os resultados desejados;
- (II) O planejamento virtual apresentado em softwares e visualizador 3D pela Click Lab, é uma simulação de tratamento e planejamento realizado sob orientação do seu ortodontista, e não é garantia de resultado. O resultado final pode ficar diferente do planejado virtualmente em 3D, por diversos fatores biológicos, mecânicos e de individualidades de cada paciente.
- (III) Após a troca de alinhadores, poderá ocorrer uma sensibilidade nos dentes;
- (IV) Gengivas, bochechas e lábios poderão apresentar feridas ou irritação;
- (V) Os dentes podem mudar de posição após o tratamento. Constante uso de contenções após o final do tratamento deve reduzir essa tendência;
- (VI) Cárie dentária, doença periodontal, inflamação de gengivas ou marcas permanentes (descalcificação, por exemplo) podem ocorrer se o paciente consumir alimentos ou bebidas que contenham açúcar e não escovar os dentes e usar fio dental, adequadamente, antes de usar os produtos Click Aligner, ou não manter uma boa higiene bucal e manutenção preventiva;

- (VII) Os alinhadores temporariamente poderão afetar a fala, como ceceio, por exemplo. Entretanto, qualquer efeito na dicção, causado por produtos Click Aligner, desaparecerá dentro de uma ou duas semanas;
- (VIII) O uso de alinhadores poderá causar um aumento temporário da salivação ou secura na boca e certos medicamentos podem aumentar este efeito;
- (IX) Attachments (botões de resina) podem ser colocados em um ou mais dentes durante o tratamento para facilitar o movimento dentário e/ou para retenção do aparelho;
- (X) Attachments podem cair e será necessário refazê-los;
- (XI) Poderá ser necessário um re-contorno de dente ou desgaste interproximal em dentes para criação de espaço necessário para que ocorra o alinhamento dentário;
- (XII) A mordida poderá sofrer alteração durante o tratamento e resultar em desconforto temporário para o paciente;
- (XIII) Raramente, um leve desgaste na superfície do alinhador pode ocorrer quando os pacientes rangem os dentes e geralmente a integridade e resistência do alinhador permanece intacta;
- (XIV) Ao final do tratamento ortodôntico, poderá ocorrer a necessidade de ajuste da mordida (“ajuste oclusal”);
- (XV) Dentes com forma e/ou erupção atípica ou ausentes podem afetar a adaptação ou podem afetar a habilidade de atingir resultados desejados;
- (XVI) Tratamento de mordida aberta severa, sobressaliência severa, dentição mista, e/ou estreitamento esquelético do arco podem necessitar tratamento adicional ao tratamento com alinhador;
- (XVII) Um tratamento ortodôntico complementar, que inclui colagem de botões, elásticos ortodônticos, aparelhos auxiliares/aparelhos dentários (por exemplo, aparelhos para ancoragem temporária, aparelhos fixos segmentados) e/ou procedimentos de restauração dentária podem ser necessários para planos de tratamento mais complexos, nos quais os alinhadores, somente, podem não ser suficientes para atingir o resultado desejado;
- (XVIII) Dentes que, por um longo período, estiveram sobrepostos (apinhados) podem apresentar falta de tecido gengival abaixo do contato interproximal, após o alinhamento dos dentes, levando ao aparecimento de um “triângulo negro”;
- (XIX) Os alinhadores não são efetivos para movimentar implantes dentários;
- (XX) Condições gerais de saúde e uso de medicamentos podem afetar o tratamento ortodôntico;
- (XXI) A saúde dos ossos e gengiva que suportam os dentes pode ser reduzida ou agravada;
- (XXII) Cirurgia bucal poderá ser necessária para a correção de apinhamento ou desequilíbrio severo de arcadas, apresentados antes do início do tratamento com produtos Click Aligner. Caso uma cirurgia bucal seja necessária, riscos associados à anestesia e recuperação apropriada deverão ser considerados antes do tratamento;
- (XXIII) Um dente que, antes do tratamento, sofreu traumas, ou foi significativamente restaurado pode sofrer agravamento. Em casos raros a vida útil de um dente pode ser reduzida, o dente pode ser perdido ou o dente pode exigir tratamentos odontológicos adicionais, tais como endodontia e/ou trabalho de restauração complementar;
- (XXIV) Restaurações dentárias existentes (ex. coroas) podem se soltar e requerer nova cimentação ou, em alguns casos, podem necessitar de serem refeitas;
- (XXV) Coroas, clinicamente, curtas podem implicar em problemas de retenção de aparelho e inibir a movimentação dentária;
- (XXVI) O comprimento das raízes dos dentes pode ser reduzido durante o tratamento ortodôntico e pode se tornar uma ameaça para a vida útil dos dentes;

- (XXVII) A quebra do produto é mais provável em pacientes com apinhamento severo e/ou com falta de vários dentes;
- (XXVIII) Aparelhos ortodônticos ou partes podem ser acidentalmente engolidos ou aspirados;
- (XXIX) Em casos raros, poderão ocorrer problemas na articulação da mandíbula, causando dores nas articulações, dores de cabeça ou problemas nos ouvidos;
- (XXIV) Podem ocorrer reações alérgicas;
- (XXX) Dentes que não estejam ao menos parcialmente cobertos pelo alinhador poderão sobre-extruir.
- (XXXI) Em casos raros, os pacientes com angioedema hereditário (AEH), uma doença genética, podem sofrer inchaço local rápido dos tecidos subcutâneos, incluindo a laringe, a AEH pode ser desencadeada por estímulos leves, incluindo procedimentos odontológicos.

INFORMATIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO E CONSENTIMENTO

Informo que li, na íntegra, todas as informações acima que expõem e descrevem o tratamento ortodôntico com alinhadores Click Aligner. Compreendo os benefícios, riscos, alternativas e inconvenientes associados ao tratamento, assim como a opção de não me submeter ao tratamento. Recebi informações suficientes e tive a oportunidade de questionar e discutir minhas preocupações e dúvidas sobre o tratamento ortodôntico com a linha de produtos Click Aligner, após consulta e prescrição feita por um doutor credenciado Click Aligner, e eu, neste ato, consinto o tratamento ortodôntico com a linha de produtos Click Aligner, que foi prescrito pelo meu doutor. Devido ao fato de a ortodontia não ser uma ciência exata, estou ciente de que o meu doutor e a Click Lab não possuem garantias e não podem dar garantias ou assegurar os resultados do meu tratamento. Entendo que a Click Lab não é prestadora de serviços médicos, dentários ou convênio médico-odontológico e não é, e nem pode praticar medicina, odontologia ou prestar aconselhamento médico. Nenhuma garantia, de qualquer tipo, foi dada pelo meu doutor ou pela Click Lab, seus representantes, sucessores e agentes, assegurando quaisquer resultados específicos relativos ao meu tratamento.

Assinatura

Nome

Endereço

Local e Data

Autorizo o meu doutor a liberar minha documentação médica, que inclui, mas não se limita a, radiografias, relatórios, gráficos, histórico médico, fotografias, modelos em gesso ou moldagens ou scan intra-oral dos dentes, prescrições, diagnósticos, exames médicos e resultados de testes, faturas e outros arquivos do tratamento em sua posse (“Arquivos Médicos”) (I) a outros dentistas e ortodontistas credenciados ou organizações que empreguem dentistas e ortodontistas credenciados, e para a Click Lab, seus representantes, empregados, sucessores e agentes para fins de investigação e análise do meu histórico médico por se tratar de um tratamento ortodôntico com produto(s) da Click Lab e (II) para fins educacionais e de pesquisa.

Entendo que o uso de minha documentação médica poderá resultar em divulgação de informações médicas identificáveis, vetadas pelo CRO – Conselho Regional de Odontologia. Autorizo, neste ato, a divulgação conforme disposto acima.

Eu não terei, nem ninguém em meu nome terá direito a pleitear por equiparação ou perda monetária, ou remediação por tal divulgação. Tenho ciência de que o uso de minha Documentação Médica é livre de ônus e que não terei, nem ninguém em meu nome terá, qualquer direito de aprovação, pedido de compensação, pleito ou obtenção de equiparação ou perda monetária, ou remediação originada de qualquer uso, desde que esteja em conformidade com os termos deste Consentimento.

Testemunha

Nome

Assinatura de Pai ou Responsável

Se o signatário for menor de 18 anos, Pai ou Responsável Legal também deverá assinar este documento